

Набор для быстрого теста на антигены к SARS-CoV-2

(Иммунохроматография коллоидного золота)



- Неинвазивный
- Простой в использовании
- Удобный, не нужны приборы
- Результат в течение 15 минут
- Стабильный и точный
- Недорогой



Больницы



Пункты тестов



Аэропорты



Вокзалы



Отели




Корпорации




Массовые тесты


Инструкция

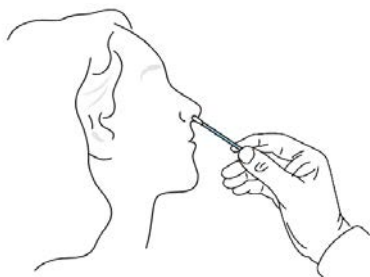


Шаг 1: Соберите образец тампоном.

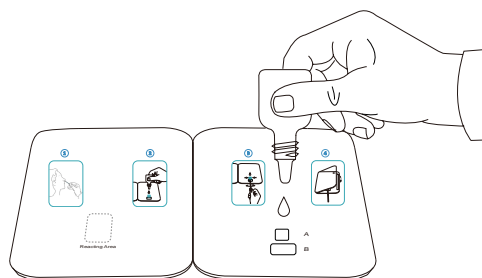

Шаг 2: Добавьте 5 капель буфера в емкость А.

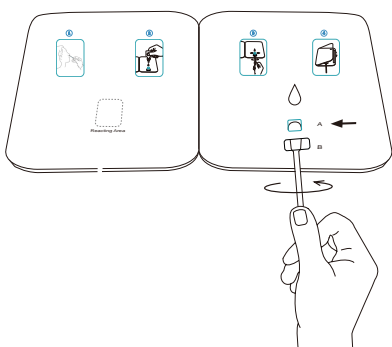

Шаг 3: Вставьте образец через емкость В в емкость А, провернув палочку по часовой и против часовой стрелки дважды.

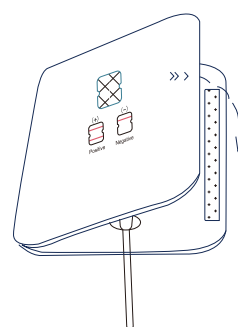

Шаг 4: Снимите наклейку, согните левую сторону и подождите 15 минут.


Трактовка результатов

Положительный






Отрицательный

Неверный

(+)

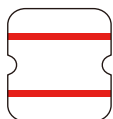

(-)

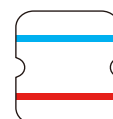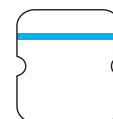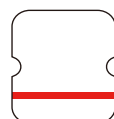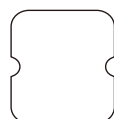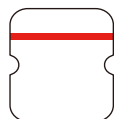


LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD

No.37 Chaoqian Rd., Changping District, Beijing, China

Набор для быстрого теста на антигены к SARS-CoV-2

(Иммунохроматография коллоидного золота)

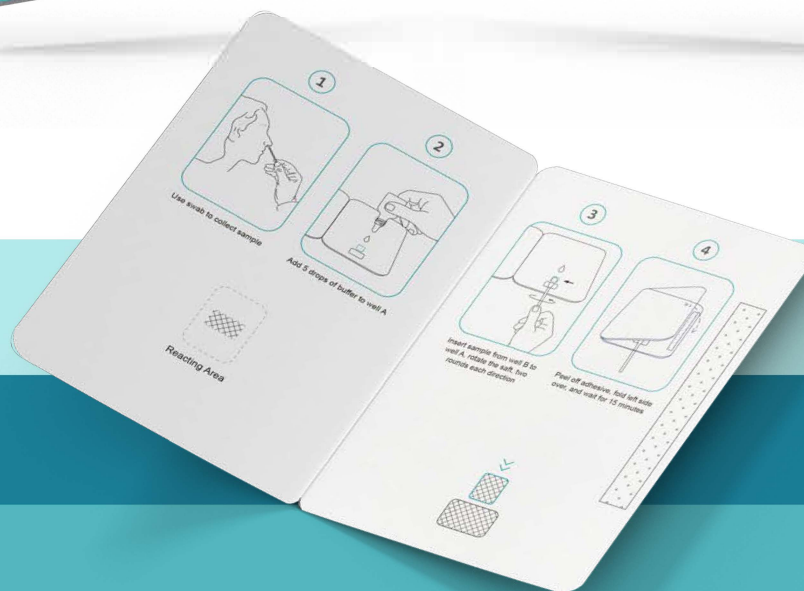

Набор для быстрого теста на антигены к SARS-CoV-2

(Иммунохроматография коллоидного
золота)



LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD

No.37 Chaoqian Rd., Changping District, Beijing, China