

**Тест на наличие
антигена SARS-COV-2
«COVID-19 Ag»**

Colloidal Gold

О Продукте

Экспресс тест на выявление антигена SARS-CoV-2 – способ диагностики COVID-19 с первого дня заболевания методом иммунохроматографического анализа за 15 минут.



98,3%

Чувствительность

99,1%


Точность

100%


Специфичность

Одобрено

Тест прошел испытания и получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 30.03.2021г. №РЗН 2021/13922.

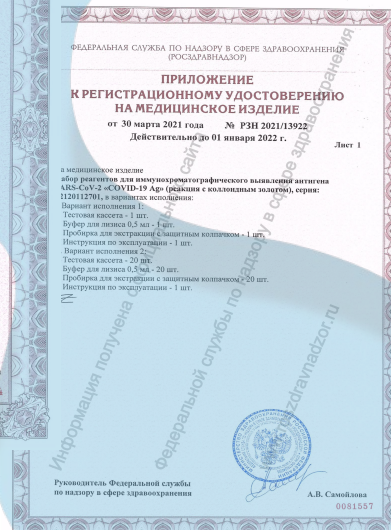


Преимущества экспресс-теста

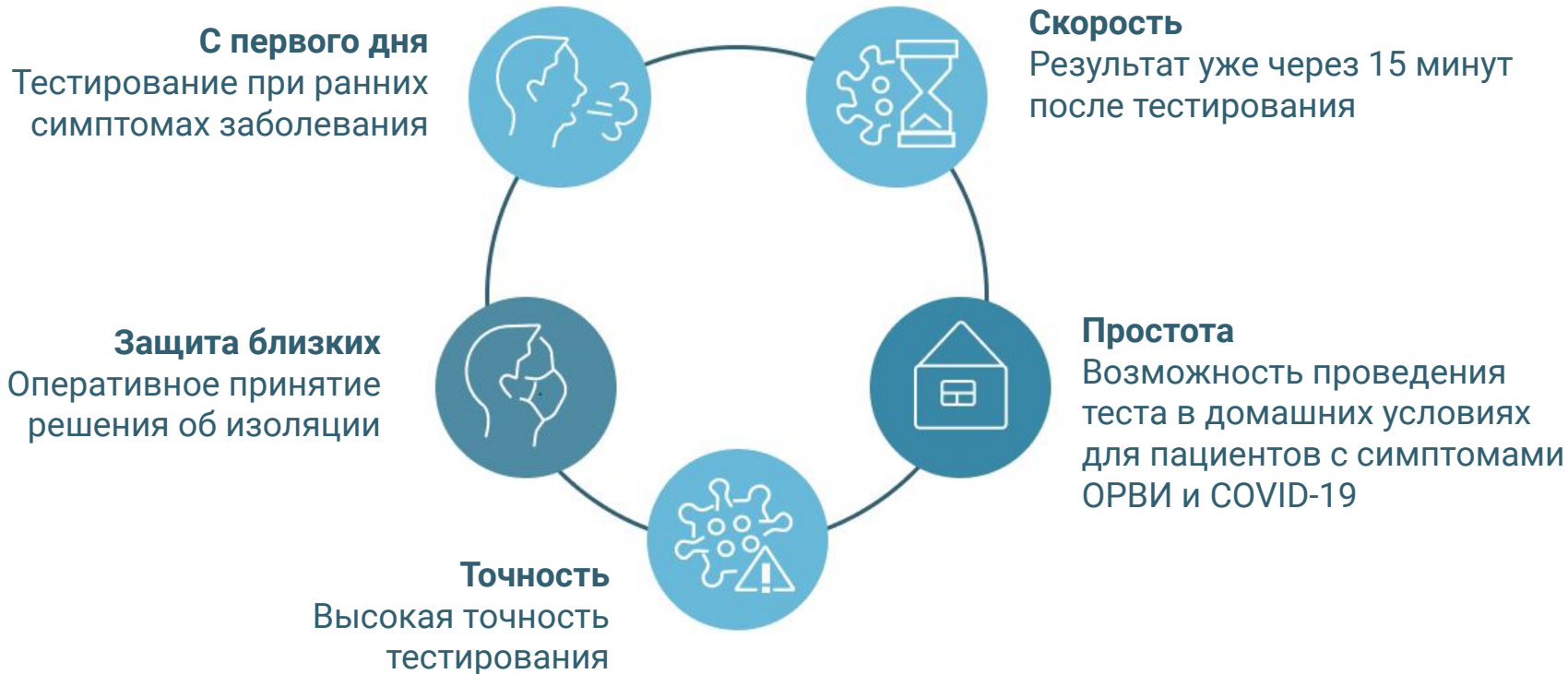

Варианты упаковки и комплектация

1. Индивидуальная упаковка

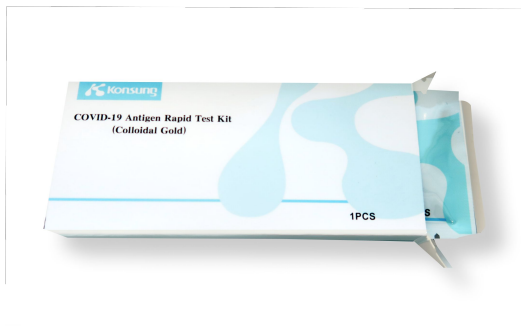


Тестовая кассета 1 шт.
Тампон для забора мазка 1 шт.
Буфер для лизиса 1 шт
Насадка с капельницей 1 шт.
Инструкция 1 шт.

2. Упаковка 20 шт.




Тестовая кассета 20 шт.
Тампон для забора мазка 20 шт.
Буфер для лизиса 20 шт.
Насадка с капельницей 20 шт.
Инструкция 1 шт.
Картонная подставка 1 шт


Проведение теста

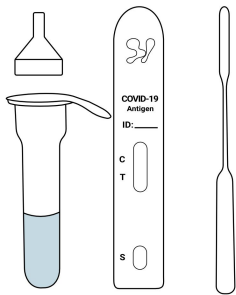


- 1** **Распакуйте и подготовьте к тестированию содержимое упаковки.** Вам понадобится стерильный тампон, буфер для лизиса, насадка с капельницей и тест кассета.

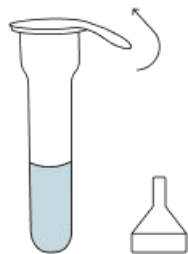

- 3** **Снимите защитную пленку с буфера.** Потяните вверх за специальный язычок и откройте буфер.

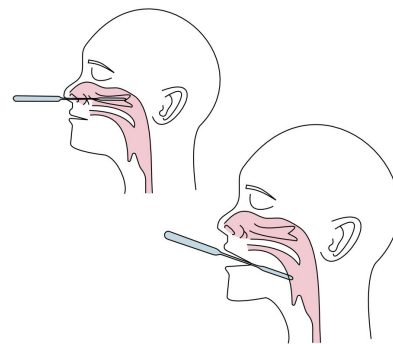


- 2** **Возьмите мазок из носа или носоглотки стерильным тампоном.** Введите тампон до стенки носоглотки или полости рта, проведите по поверхности и затем выньте.

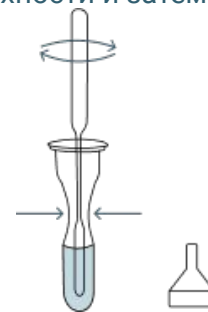


- 4** **Вставьте тампон с мазком в буфер.** Сжимайте флакон и проверните 5 раз тампоном внутри.

Проведение теста

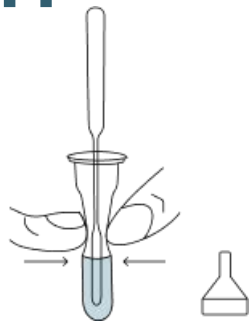


5

Сожмите тампон в буфере и извлеките его.
Убедитесь, что вся жидкость с тампона стекла в буфер.

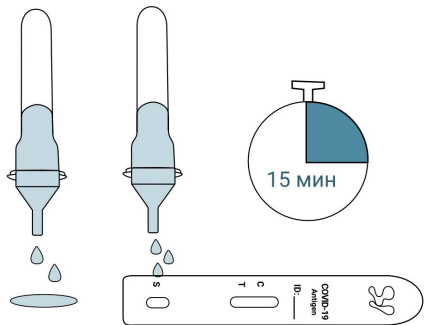


7

Переверните буфер и слейте 2 капли образца (мимо кассеты).
Налейте 3 капли образца из буфера на тест-кассету. Подождите 15 минут.

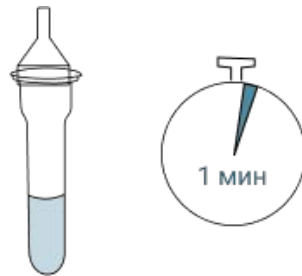

6


Плотно вставьте насадку с капельницей в буфер.
Дайте постоять буферу 1 минуту.

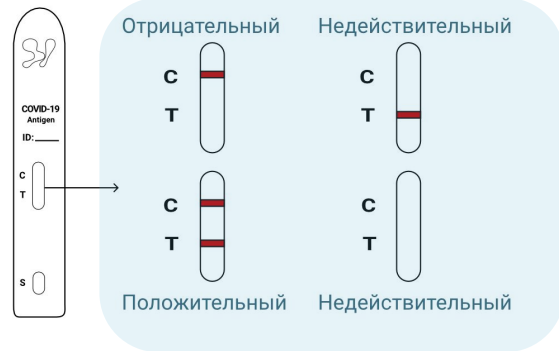

8


Проверьте результат через 15 минут.
Внимание, не проверяйте результат больше, чем через **30 минут**, так как он может быть недостоверным.

Кому подходит тест

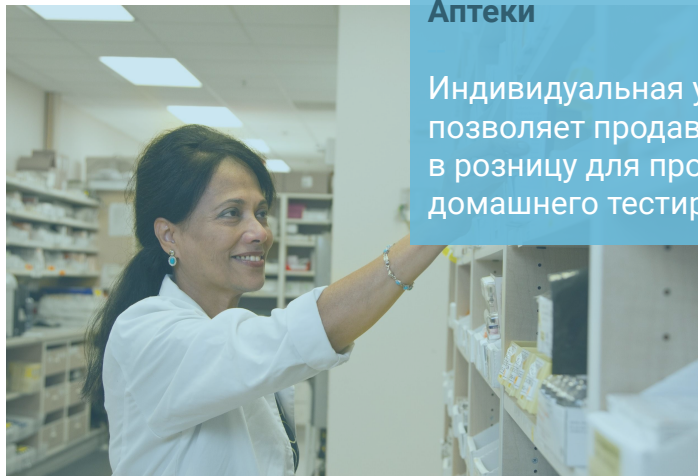

Аптеки

Индивидуальная упаковка позволяет продавать тест в розницу для проведения домашнего тестирования.

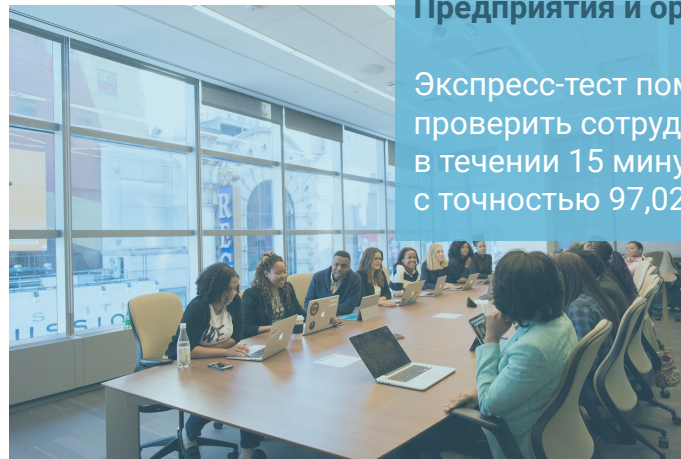

Предприятия и организации

Экспресс-тест поможет проверить сотрудника в течении 15 минут с точностью 97,02%



Лаборатории и медицинские учреждения

Экспресс-тесты подходят для выездных проверок и для тестирования в лабораториях.

Для приобретения теста на наличие антигена
SARS-COV-2 «COVID-19 Ag» свяжитесь с нами
любым удобным вам способом.



Контакты:

Прощенко Артем Вадимович
Телефон: +7 (800) 333-19-23
+7(911) 004-03-21
E-mail: info@konsungrus.ru